

	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ ANESTEZİ CİHAZI GÜNLÜK BAKIM VE KONTROL FORMU	Doküman No MC.FR.06	Yürürlüğe Gir.Tar. 02.12.2024																
		Revizyon No 00	Revizyon Tarihi --																
		Sayfa No Sayfa 1/1																	
YAPILACAK KONTROLLER																			
1	Günlük bakım ve kontroller kullanıcı personel tarafından yapılacak.																		
2	Cihazın fiziki temizliği yapılacak.																		
3	Cihaz gaz girişleri kontrol edilecek, cihazda kaçak kontrolleri yapılacak.																		
4	Cihaza entegre olan yedek medikal gaz tüplerinin kontrolü yapılacak.																		
5	Manometreler ve göstergelerin çalışması kontrol edilecek.																		
6	Monitör ve diğer ekipmanların çalışması kontrol edilecek.																		
7	Yapılan kontrollerde görülen eksiklikler teknik servise bildirilecek.																		
AY/YIL:		BİRİM:																	
GÜNLER	Merkezi Gazların Basınç Değeri			Yedek Tüplerin Basınçları			Merkezi Gazların Basınç Değeri			Yedek Tüplerin Basınçları			KONTROL EDEN Adı Soyadı/İmza						
	Markası:			Oda:			Modeli:			Markası:				Oda:			Modeli:		
	Oksijen/Bar (4-6 Bar)	Azot/Bar (≥4)	Hava/Bar (4-6 Bar)	Oksijen/Bar (4-6 Bar)	Azot/Bar (≥4)	Oksijen/Bar (4-6 Bar)	Azot/Bar (≥4)	Hava/Bar (4-6 Bar)	Oksijen/Bar (4-6 Bar)	Azot/Bar (≥4)	Oksijen/Bar (4-6 Bar)	Azot/Bar (≥4)							
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
Açıklama:																			
Not: Cihaz; Çalışır ise (Ç), Arızalı ise (A), Bakımda ise (B) yazılır. Günlük bakım ve kontroller kullanıcı personel tarafından yapılacak.																			