

	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ HASTA BAŞI MONİTÖRÜ GÜNLÜK BAKIM VE KONTROL FORMU			Doküman No	MC.FR.08		
				Yürürlüğe Gir.Tar.	02.12.2024		
				Revizyon No	00		
				Revizyon Tarihi	--		
				Sayfa No	Sayfa 1/1		
YAPILACAK KONTROLLER							
1	Hasta kablosu, lead'lar ve diğer bağlantı hortum ve kablolarının hasarlı olup olmadığı kontrol edilecek.						
2	Elektrotların son kullanım tarihleri kontrol edilecek.						
3	Printerda kâğıt olup olmadığını kontrol edilecek.						
4	Pulse oksimetrelili cihazlarda ara kablosu ve probu kontrol edilecek.						
5	Tansiyon ölçüm aparatının hortum ve manşonları kontrol edilecek.						
6	Her vaka sonrası elektrotlar alkol ya da sabunlu su ile temizlenecek.						
7	Ekranda hata kodu uyarısı olup olmadığı kontrol edilecek.						
8	Cihazın şarj durumu kontrol edilecek.						
9	Yapılan kontrollerde görülen eksiklikler teknik servise bildirilecek.						
AY/YIL:				BİRİM:			
GÜNLER	CİHAZIN DURUMU		CİHAZIN DURUMU		CİHAZIN DURUMU	KONTROL EDEN Adı Soyadı	KONTROL EDEN İmza
	Markası:	Oda:	Markası:	Oda:			
	Seri No:		Seri No:				
	Modeli:		Modeli:				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Açıklama:							
Not: Cihaz; Çalışır ise (Ç), Arızalı ise (A), Bakımda ise (B) yazılır. Günlük bakım ve kontroller kullanıcı personel tarafından yapılacaktır.							