



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
GECE PLAĞI (ESSIX) CİHAZI
ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.46
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/2

1. AMAÇ

Talimatın amacı; gece plağı (Essix) cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISLATMALAR

4. TANIMLAR

6. SORUMLULAR

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

- 6.1.1. Cihaz güç kaynağına takılır.
- 6.1.2. Sürgülü levha(mengene) tahliye kolu yardımı ile açılır.
- 6.1.3. Lastik şerit mengene içine yerleştirilir. Tahliye kolu ile kapatılır.
- 6.1.4. Sürgülü levha altıgen direk üzerindeki durdurma deliğine kadar kaldırılır.
- 6.1.5. Dik levhaya diş modeli yerleştirilir.
- 6.1.6. Zamanlayıcı ayarlanır ve ısıtıcı çalıştırılır. (I)gösterge ışığı yanacaktır.
- 6.1.7. 2 veya 2,6 dakika ısıtıcı yeterli ısıya ulaşıncaya kadar beklenir. Isı kontrol edilir.
- 6.1.8. Üst iskeleti ileriye (180) itilir. Ve lastik şerit veya model yüksekliği ½" çökünceye kadar beklenir. (20 saniye -1 dakika) lastik şeridin sertlik ve kalınlığına göre değişir.
- 6.1.9. Isıtıcı kapatılır (I) ve vakumu çalıştırılır(II).
- 6.1.10. Sürgülü levha ana iskelete doğru çekilir.
- 6.1.11. Lastik şerit içine çekinceye kadar beklenir.(10-60 saniye veya daha fazla)
- 6.1.12. Vakum ve zamanlayıcı (0) kapatılır. Üst iskelet (180) geri çekilir.
- 6.1.13. Sürgülü levha tahliye kolu ile açılır. Şekil almış lastik şerit çıkarılır.
- 6.1.14. İşlem bitince cihaz kapatılır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU"na işler.

6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "BAKIM / ONARIM / KALİBRASYON İSTEK FORMU" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
GECE PLAĞI (ESSIX) CİHAZI
ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.46
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 2/2

6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3. Gece Plağı Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1. Aylık Bakım:

6.3.1.1. Fiziki temizliği yapılır.

6.3.1.2. Çalışması kontrol edilir

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. YILLIK BAKIM PLANI
2. BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU
3. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU
4. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ