



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
DİŞ ÜNİT CİHAZI
ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.04
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Diş ünit cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

- 6.1.1. Koltuk fonksiyonlarının tamamı tablet üzerindeki dokunmatik tuşlar aracılığı ile kontrol edilir.
- 6.1.2. Kreşuar yıkama, bardak doldurma, reflektör ve yine tablet üzerinde bulunan kumanda panelindeki birbirinden bağımsız dokunmatik tuşlar aracılığı ile gerçekleştirilmelidir.
- 6.1.3. Kumanda panelinin üst kısmında bulunan basınç göstergesi türbine bağlı olup çalışma sırasında başlıktaki hava basıncını göstermelidir.
- 6.1.4. Filtreli hava regülatörünün filtre kısmı haftada en az bir kez suyunu tahliye etmek suretiyle temizlenir.
- 6.1.5. Başlıkları her hastadan sonra uygun dezenfektanla temizlenir.
- 6.1.6. Cihazın tamamı her hastadan sonra ağız ve diş sağlığı teknikeri, klinik hemşiresi veya temizlik görevlisi tarafından dezenfektanlı solüsyon emdirilmiş spanç ile silinir, hava su spreyi, ışık tabancası tabla, reflektör kolları ve ünit tablasının kolları streç film ile kaplanır.
- 6.1.7. Hava regülatörünün ayarı kesinlikle değiştirilmez.
- 6.1.8. Çalışma sonunda cihaz açma-kapama düğmesinden kapatılır.(su ve hava vanalarının kapalı olduğundan emin olunuz.)

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

- 6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, "TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
- 6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLAN FORMU'NU düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise ARIZA BİLDİRİM FORMU ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU"na işler.
- 6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda ARIZA BİLDİRİM FORMU doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir.
- 6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3. Aylık Bakım:

- 6.3.1. Reflektör kontrolü yapılır.
- 6.3.2. Koltuk hareketleri kontrol edilecek.
- 6.3.3. Sakşın kontrol edilecek.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON FORMU
2. BAKIM VE ONARIM TALEP FORMU
3. BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLANI
4. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU
5. ARIZA BİLDİRİM FORMU
6. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ