



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
AMALGAM VE CAM İYONOMER KARIŞTIRMA
CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM
TALİMATI

Doküman No	MC.TL.11
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Amalgam ve cam iyonomer karıştırma cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

6.1.1. Cihaz prize takılır.

6.1.2. “ON” düğmesi ile açılır.

6.1.3. Plastik kapsül içindeki dolgu materyallerinden dişe uygun renkte seçilerek hazırlama işlemine geçilir.

6.1.4. Kapsül içindeki sıvı ve toz içeriğin karıştırılması için özel hazırlanmış aletle kapsül 2 saniye preslenir.

6.1.5. Doktor işlemine göre santrifüj süresini ayarlar.

6.1.6. Kapsül santrifüj için cihaza yerleştirilir kapağı kapatıldıktan sonra start tuşu ile karıştırma işlemi başlatılır.

6.1.7. Cihaz otomatik olarak kullanıma hazır cam iyonomer dolgu maddesi hazırlar.

6.1.8. Karıştırma işleminden sonra ağız ortamına taşıyıcı alet yardımıyla dolgu maddesi taşınır.

6.1.9. Işık tabancası ile polarize mavi ışıkla sertleşmesi sağlanır.

6.1.10. Cihaz kapatılır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLAN FORMU’NU” düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise ARIZA BİLDİRİM FORMU” ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU”na işler.

6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda ARIZA BİLDİRİM FORMU” doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir.

6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3. Günlük Bakım:

6.3.1. Personel tarafından günlük fiziki temizliği yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON FORMU

2. BAKIM VE ONARIM TALEP FORMU

3. BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLANI

4. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU

5. ARIZA BİLDİRİM FORMU

6. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ