



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
DENTAL VAKUM CİHAZI BAKIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.49
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde bulunan dental vakum cihazının bakımının yapılabilmesi.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesinde bulunan dental vakum cihazını kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından Teknik Hizmetler Birimi sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

Dental vakum cihazı aylık olarak kontrol edilecektir.

6.1. Bakımda Yapılacak İşlemler:

6.1.1. Öncelikle aylık kontrollerde cihazın bulunduğu bölgenin temizliği sağlanacaktır.

6.1.2. Herhangi bir kazaya karşı öncelikle gerekli tedbirler alınmalıdır.

6.1.3. Cihazların bağlantıları kontrol edilip, yıpranmış, aşınmış aksamlar bakım formuna kayıt edilmelidir.

6.1.4. Cihazların ekranlarında herhangi bir arıza işareti olup olmadığına bakılır. Bakteri filtresi değişim zamanı kontrol edilmeli eğer zamanı gelmiş ise satınalma birimine bilgi verilmelidir.

6.1.5. Cihazın nötralizan sıvı seviyesi kontrol edilmelidir. Eksilme var ise tamamlanmalıdır.

6.1.6. Tankların içleri ve çıkış borularında herhangi bir tıkanma olup olmadığı kontrol edilmelidir.

6.1.7. Basit arızaları giderilir. Ancak anlaşılamayan veya mevcut imkanlar ile tamiri mümkün olmayan durumlar için hizmet satın alınmalıdır.

6.2. Cihazın Bakımı

6.2.1. Teknik servis personeli fakültemizdeki tüm makine ve cihazların bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. YILLIK BAKIM PLANI

2. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU