

	T.C. D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BASINÇLI AKRİL PİŞİRME FIRINI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI	Doküman No	MC.TL.52
		Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
		Revizyon No	02
		Revizyon Tarihi	02.01.2019
		Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Talimatın amacı; basınçlı akril pişirme fırınının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

3. SORUMLULAR

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

6.1.1. Cihazın kapağı açılır, kazana malzeme konularak su ile doldurulur.

6.1.2. Kapak kapatılıp sıkılır.

6.1.3. On/off butonuyla cihaz açılır.

6.1.4. Timer (zaman) ve termi(ısı) kademesi uygun kademeye ayarlanır.

6.1.5. “Start” butonuna basılarak çalıştırılır.

6.1.6. Cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar, kompresör yeterli basınca ulaştınca stop eder. Rezistans devreye girerek suyun istenilen derecede ısıtma işlemine tabi tutar. Su yeterli ısıya ulaştıktan sonra timerdan ayarlanan süre boyunca dijital ekrandan geri sayım yapılır. Bu süre boyunca basınç ve ısı sabit tutulur, geri sayım bitince su ve hava tahliye olur.

6.1.7. İşlem sona erince kapak açılarak malzeme cihazdan alınır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1.Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, “YILLIK BAKIM PLANI” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2.Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise “BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU” ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU”na işler.

6.2.3.Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda “BAKIM / ONARIM / KALİBRASYON İSTEK FORMU” doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine “KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ” asılır.

6.2.4.Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3. Basınçlı Akril Pişirme Fırını Bakım Talimatı

6.3.1. Aylık Bakım:

6.3.1.1. Fiziki temizliği yapılır.

6.3.1.2. Çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. YILLIK BAKIM PLANI

2. BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU

3. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU

4. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ