



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
SANTRİFÜJ CİHAZI
ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.28
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Santrifüj cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

6.1.1. Cihaz güç kaynağına takılır.

6.1.2. Açma-kapama düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

6.1.3. Hastadan alınan kan ya da kan dolu tüpler cihazın içerisindeki haznelere karşılıklı olarak konur.

6.1.4. Prf işlemi için 1000 devir/dak hızda 7 dakika santrifüj yapılır.

6.1.5. Elde edilen prf çeşitli işlemlerden geçirilerek hastalara uygulanacak hale getirilir.

6.1.6. İşlem bittikten sonra cihazın güç kaynağından bağlantısı kesilir.

6.3. Santrifüj Cihazı Bakım Talimatı:

6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLAN FORMU’NU düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise ARIZA BİLDİRİM FORMU ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU”na işler.

6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda ARIZA BİLDİRİM FORMU doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir.

6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3. Aylık Bakım:

6.3.1. Panelin buton kontrolleri yapılmalı.

6.3.2. Motor aksamının kontrolleri yapılmalı.

6.3.3. Kavanozların kontrolü yapılmalı.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON FORMU

2. BAKIM VE ONARIM TALEP FORMU

3. BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLANI

4. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU

5. ARIZA BİLDİRİM FORMU

6. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ