



T.C.
D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
BEYAZLATMA CİHAZI
ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.14
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	03.08.2018
Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Beyazlatma cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

- 6.1.1. Beyazlatma cihazı güç kaynağına takılır.
- 6.1.2. Cihazın ucuna beyazlatmayı sağlayan çipi içeren ağızlık takılır.
- 6.1.3. Dişlerine beyazlatma jeli uygulanan hastanın ağzına denk gelecek şekilde yerleştirilir ve cihazın başlatma düğmesine basılır.
- 6.1.4. Diş hekiminin isteğine bağlı olarak ışık tutma işlemi tekrarlanır.
- 6.1.5. İşlem esnasında cihazın yaydığı ışınla direkt göz teması sağlanmamalıdır.
- 6.1.6. İşlem sonrasında cihaz yüzey dezenfektanıyla temizlenir.
- 6.1.7. Cihazın güç kaynağından bağlantısı kesilir.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

- 6.2.16.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
- 6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLAN FORMU’NU” düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise ARIZA BİLDİRİM FORMU” ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU”na işler.
- 6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda ARIZA BİLDİRİM FORMU” doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir.
- 6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3. Beyazlatma Cihazı Bakım Talimatı

6.3. Aylık Bakım

- 6.3.1. Personel tarafından günlük fiziki temizliği yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON FORMU
2. BAKIM VE ONARIM TALEP FORMU
3. BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLANI
4. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU
5. ARIZA BİLDİRİM FORMU
6. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ