



T.C.
D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
ALGINATE AUTO-MİXER CİHAZI ÇALIŞTIRMA
VE BAKIM ONARIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.19
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Talimatın amacı; alginate auto - mixer cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

6.1.1. Cihaz prize takılır.

6.1.2. ON düğmesine basılır, cihaz açılır.

6.1.3. İstenilen miktarda alginate, alginate kabına konur. Bir miktar su ile karıştırılır.

6.1.4. Cihazın üst kapağı açılır, alginate kabı yerine konur. Kapak kapatılır.

6.1.6. (+) ve (-) tuşları ile istenilen süre ayarlanır. “START” düğmesine basılır.

6.1.6. İşlem tamamlandıktan sonra alginate kabı çıkarılır, ölçü kaşıklarına alginate konur.

6.1.7. OFF düğmesine basılır, cihaz kapatılır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLAN FORMU’NU düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise ARIZA BİLDİRİM FORMU ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU”na işler.

6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda ARIZA BİLDİRİM FORMU doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir.

6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3. Alginate Auto- Mixer Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1. Üç Aylık Bakım:

6.3.1.1. Fiziki temizliği personel tarafından yapılır..

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON FORMU

2. BAKIM VE ONARIM TALEP FORMU

3. BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLANI

4. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU

5. ARIZA BİLDİRİM FORMU

6. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ