



T.C.
D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
ELEKTROKOTER CİHAZI
ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.27
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Elektrokoter cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

D.Ü. Dış Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

6.1.1. Elektrokoter cihazının kablolarının yeterli uzunlukta olup olmadığı ve bağlantılarının doğruluğu kontrol edilir, cihazın fişi 220w topraklı prize takılır.

6.1.2. Elektrokoter cihazının plağını hastanın ekstremitelerinin (kol ya da bacağının) metal ile temas edip edilmediği kontrol edilir, metal ile temas etmemelidir. Emin olduktan sonra koter plağı hastanın uygun olan ekstremitesine dispozbil plak kullanılıyorsa yapıştırılır. Rezibl plak kullanılıyor ise plağı ekstremita ile temas edecek şekilde yerleştirilir ve hastanın ekstremitesini oynatma, kaldırma riskine karşı sabitlenir, bağlanır.

6.1.3. Koter plağı uygulanacak bölge kıllı ise kıldan arındırılmalıdır.

6.1.4. Hastanın altında sıvı birikmesini önleyecek tedbirler alınır, sıvı birikebilecek ameliyatlarda hasta altı bezi kullanılır.

6.1.6. Odanın nem oranının % 60 seviyesinde olmasını kontrol edilir.

6.1.6. Kullanılan ünipolar koter ise 3'lü girişe, bipolar koter ise koter ucunu 2'li girişe yerleştirilir.

6.1.7. "Start" düğmesine basılır ve cerrahın istediği dereceye göstergesi ayarlanır.

6.1.8. Son kontrolleri yaparak cihazı kullanıma hazır hale getirilir.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, "TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLAN FORMU'NU düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise ARIZA BİLDİRİM FORMU ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU"na işler.

6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda ARIZA BİLDİRİM FORMU doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir.

6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3. Elektrokoter Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1. Aylık Bakım:

6.3.1.1. Cihazın genel temizliği yapılır.

6.3.1.2. Cihazın çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON FORMU

2. BAKIM VE ONARIM TALEP FORMU

3. BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLANI

4. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU

5. ARIZA BİLDİRİM FORMU

6. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ