



T.C.
D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
PONORAMİK RÖNTGEN CİHAZI ÇALIŞTIRMA
BAKIM ONARIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.08
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/2

1. AMAÇ

Talimatın amacı; Panoramik röntgen cihazının (panoramik-sefalometrik) çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasını yapmaktır.

2. KAPSAM

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

6.1.1. Röntgen odasının havalandırması açılır.

6.1.2. OPG cihazının açma kapama butonundan cihaz hazır konuma getirilir.

6.1.3. Tetkik istenen hasta röntgen odasına alınır.

6.1.4. Panoramik film çekilecekse hastaya OPG cihazına yüzü dönük şekilde, sefalometrik film çekilecekse hastaya hekimin istediği bölgelere kurşun boncuklar yerleştirildikten sonra uygun konum tarif edilerek pozisyon alması söylenir.

6.1.5. Panoramik film çekerken cihaz üzerindeki ısırma bloğuna disposable poşet, sefalometrik film çekerken ise kulak rodlarına disposable poşet takılır.

6.1.6. Panoramik filmde hastanın çenesi çene dayanağına yerleştirilerek sabitlenir. Sefalometrik film çekerken ise cihazın rehber ışıkları yakılarak bunlara göre hastanın kafasının konumlanması sağlanır.

6.1.7. Panoramik filmde hastaya ısırma bloğunu ısırması söylenir. Sefalometrik filmde ise hastaya hareket etmemesi söylenir.

6.1.8. Kafa stabilizatörü ile hastanın başı sabitlenerek OPG' si çekilir.

6.1.9. İşlem sonrasında ısırma bloğundaki ve kulak rodlarındaki kullanılmış poşet değiştirilip blok dezenfekte edilir.

6.1.10. OPG cihazı açma kapama butonu ile kapatılır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, "TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLAN FORMU'NU düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise ARIZA BİLDİRİM FORMU ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU"na işler.

6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda ARIZA BİLDİRİM FORMU doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir.

6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3. Panoramik ve Sefalometrik Görüntüleme Cihazı Bakım Talimatı

	T.C. D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ PONORAMİK RÖNTGEN CİHAZI ÇALIŞTIRMA BAKIM ONARIM TALİMATI	Doküman No	MC.TL.08
		Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
		Revizyon No	02
		Revizyon Tarihi	02.01.2019
		Sayfa No	Sayfa 2/2

6.3.1. Aylık Bakım:

6.3.2. Genel temizliği yapılır.

6.3.3. Çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON FORMU
2. BAKIM VE ONARIM TALEP FORMU
3. BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLANI
4. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU
5. ARIZA BİLDİRİM FORMU
6. KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ